



PINOFIT®
Physio Bandagen



Die Bandagen sind ideal, um bestimmte Halterungen der Muskulatur oder der Gelenke zu unterstützen und stabilisieren, ohne die Bewegungsfreiheit zu sehr einschränken. Durch die leicht dehbare Struktur und die individuelle Zuschneidemöglichkeit lassen sich die Bandagen bei vielfältigen Bandageanlagen passgenau anlegen. Sie sind in unterschiedlichen Breiten erhältlich und lassen sich nach dem Klettverschlussverfahren zuverlässig fixieren.



PINOFIT® Physio Bandagen

- je nach Anlage können 3 verschiedene Breiten (2,5 cm, 5 cm und 10 cm) genutzt werden
- leicht dehnbar, bestehend aus einer Neopren - und einer Nylonschicht
- perforierte Neoprenschicht für besseren Hautkontakt
- langlebig, wiederverwendbar und bei bis zu 40° C waschbar



PINOFIT® Hook Patch

- ist ein nicht dehnbares Nylongewebe zur Fixierung der Bandagen
- langlebig, wiederverwendbar und bei bis zu 40° C waschbar





MATERIAL:

- 5 cm PINOFIT® Physio Bandage Slot-Form
- PINOFIT® Hook Patch (ca. 10 - 15 cm lang)

Abmessung:

Schultergürtel Umfang (siehe Verlauf)

AUSGANGSSTELLUNG:

Stand in Neutralstellung

TECHNIK:


Korrektur-Technik

Start und Verlauf:

ein Ende der Bandage durch den Slot ziehen
Schlaufe anlegen und in Achtertour den anderen Schultergürtel
umfassen und fixieren

Beachte:

Anlage so gestalten, dass der Patient die Bandage selber
fixieren und spannen kann!

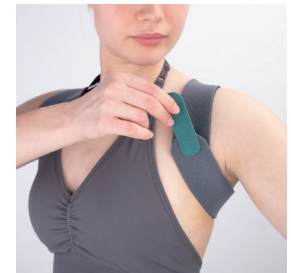



MATERIAL:

- 10 cm PINOFIT® Physio Bandage I-Form
- 5 cm PINOFIT® Physio Bandage Y- Form
- PINOFIT® Hook Patch (ca. 2 - 3 cm lang)

Abmessung:

1. Ellenbogengelenk Umfang + 2 cm (10 cm Breite)
2. 10 cm Länge (5 cm Breite) Y-Form

AUSGANGSSTELLUNG:

Palmarflexion und Ellbogenextension

TECHNIK:

Connection-Technik

Start und Verlauf:

1. zirkulär distal des Ellbogengelenkes
2. ulnar wird die Basis geklettet und mit den zwei Enden über die Affektion gezogen und wiederum mit zwei Hook Patches zur zusätzlichen Entlastung fixiert



MATERIAL:

- 5 cm PINOFIT® Physio Bandage I-Form
- PINOFIT® Hook Patch (ca. 5 cm lang)

Abmessung:

1 komplette Rolle

AUSGANGSSTELLUNG:

Pronation/ Palmarflexion und Ellbogenextension

TECHNIK:

Wrap-Technik

Start und Verlauf:

distal des Handgelenkes in Richtung Ellbogengelenk
halbüberlappend

Ausführung:

aktives Bewegen, z.B. mit Hantel



MATERIAL:

- 5 cm PINOFIT® Physio Bandage I-Form
- PINOFIT® Hook Patch (ca. 2 - 3 cm lang)

Abmessung:

2 x Knie Umfang + 2 x mindestens 5 cm

AUSGANGSSTELLUNG:

Stand mit leichter Hüft- und Kniebeugung

TECHNIK:

Connection-Technik

Start und Verlauf:

1. unterhalb der Patella zirkulär
2. oberhalb der Patella zirkulär
3. Hook Patch fixieren in der Mitte der Bandage am Oberschenkel
-> das Ende aussen in Richtung Fibulakopf fixieren
4. Hook Patch fixieren in der Mitte der Bandage an der Oberschenkel Rückseite
-> das Ende aussen in Richtung Tibia Kopf fixieren

Beachte:

Bandage so anlegen, dass sie sich an den zirkulären Verläufen mit den Patches in der Bein Innenseite öffnen lassen





Lass dich & dein Team professionell schulen

PINOFIT Physio Bandagen ermöglichen vielseitige therapeutische Anwendungen, die bestimmte Halterungen der Muskulatur und Gelenke stabilisieren können, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken. Es werden u.a. Anlagetechniken für den Rücken, die LWS, die oberen und unteren Extremitäten geschult. Der Clou: die Patienten können die Bandagen auch nach der Behandlung weiterhin eigenständig nutzen.

Kursdauer:	1 Tage: 9:00 - 17:00 Uhr
Festpreis für 1 Tag:	279€ inkl. MwSt.
Im Kurs enthalten:	alle benötigten Materialien, Teilnahmezertifikat
Kursort:	Hamburg, Büren (NRW), Gummersbach (NRW), im Raum Rosenheim (BY)

Bis zu 55%* sparen

Buchen Sie einen Intensivkurs in Ihren Räumlichkeiten.

Festpreis für 1 Tag: 1499€ inkl. MwSt. für bis zu 12 Teilnehmer

*Statt 3.348€ bei Einzelbuchung von 12 Teilnehmern à 279€.

AUTOREN:

Carsten Boss | Therapeutischer Leiter PINO GmbH | cbo@pino-gmbh.de

Mit freundlicher Unterstützung von Marcel Michelbrink, Christoph Thaler,
Henrique Dias & Thorsten Büscher.

PINO Pharmazeutische Präparate GmbH

Große Elbstraße 281

D- 22767 Hamburg

service@pinoshop.com

Tel.-Hotline aus Deutschland:

0800 74 66 22 55 (gebührenfrei)

Tel.-Hotline aus Österreich/Schweiz:

00800 74 66 22 55 (gebührenfrei)

www.pinoshop.com

COPYRIGHT BY PINO PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE GMBH HAMBURG/GERMANY

Alle Rechte an den Abbildungen (mit Ausnahme der Abbildungen aus anderen benannten Quellen) liegen ausschließlich bei der PINO Pharmazeutische Präparate GmbH. Das Werk, einschließlich aller Fotos und Grafiken ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung von der PINO Pharmazeutische Präparate GmbH und der Autoren unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronischen Systemen.